

## CROPP- RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA – TOMOGRAFIA .

### Software nemotec .

#### Funções do teclado + lado esquerdo do mouse.

ZOOM – SHIFT

MOVER IMAGEM – CTRL

BRILHO E CONTRASTE – W

ORIENTAÇÃO DOS CORTES- O

MEDIDAS LINEARES – M

LIMITAR VOLUME 3D – C

ADICIONAR IMPLANTE – I

#### *Navegação das imagens :*

1. Clicando na linha do plano de imagem e arrastando o mouse.
2. Clicando num ponto de interesse .
3. Rolando a esfera do mouse sobre o plano de imagem desejado.

*Imagem em tela cheia* - clique no símbolo + no canto inferior esquerdo da imagem.

#### *Ferramentas do canto superior direito:*

Visualização da imagem em ray sun, MIP, MPR e VR.

Espessura da camada de imagem – em Th nas visualizações, exceto MPR.

Ajuste automatico de brilho e contraste ww

Filtros de imagem: detalhes, relevo, galsiano, bordas.

#### *Adicionando imagens a galeria:*

Lado direito do mouse sobre a imagem desejada – clicar em adicionar a galeria.

Para visualizar as imagens desejadas clicar em galeria no canto superior esquerdo e selecionar.

Para voltar à navegação clique em Nav.

**Gerando radiografias:** Clicar com o lado direito do mouse sobre o plano desejado para gerar o rx, clicar em criação/edição de rx, selecionar o tipo de radiografia e gerar.

**3D:** no lado esquerdo da imagem 3D pode se visualizar em VR e sup. osso –H, tecido mole –S, ambos – B.