

Manual

NEMOTEC 

Get started



Software Nemotec

Funções do teclado + lado esquerdo do mouse:

- Zoom - SHIFT
- Mover Imagem - CTRL
- Brilho e Contraste - W
- Orientação dos Cortes - O
- Medidas Lineares - M
- Limitar Volume 3D - C
- Adicionar Implante - I

Navegação das imagens:

1. Clicando na linha do plano de imagem e arrastando o mouse;
2. Clicando em um ponto de interesse;
3. Rolando a esfera do mouse sobre o plano de imagem desejado.

Imagem em Tela Cheia:

- Clique no símbolo "+" no canto inferior esquerdo da imagem.

Ferramentas do Canto Superior Direito:

- Visualização da Imagem em Ray Sun, MIP, MPR e VR;
- Espessura da Camada de Imagem - em Th nas visualizações, exceto MPR;
- Ajuste Automático de Brilho e Contraste;
- Filtros de Imagem: detalhes, relevo, galsiano e bordas.

Adicionando Imagem à Galeria:

- Lado direito do mouse sobre a imagem desejada - clicar em Adicionar à Galeria;
- Para visualizar as imagens desejadas - clicar em Galeria no canto superior esquerdo e selecionar;
- Para voltar à navegação - clicar em Nav.

Gerando Radiografias:

1. Clicar com o lado direito do mouse sobre o plano desejado para gerar o RX;
2. Clicar em Criação/Edição de RX;
3. Selecionar o tipo de radiografia;
4. Gerar.

3D:

- No lado esquerdo da imagem 3D pode-se visualizar em VR e Sup
- Osso - H
- Tecido Mole - S
- Ambos - B